

TERMOSIGILLATRICE

millseal
rolling



Termoselladora Millseal Rolling con rodillo es un complemento de la gama de productos Mocom dedicada a la esterilización.

Rolling Millseal, se presenta en un diseño elegante y tamaño reducido que une facilidad de uso y alta fiabilidad, incluso en los casos de uso prolongado.

Rolling Millseal, representa una opción interesante para todos los usuarios que necesitan equipos profesionales con un alto rendimiento.



La sólida estructura de acero y plástico, su forma ergonómica y su peso permiten mantener un alto nivel de higiene y estabilidad durante el uso.

Todo ello con el objetivo de ofrecer un producto adecuado a las necesidades diarias en el campo de la medicina.



Un dispositivo óptico de detección pone en movimiento la cinta (V=10 m/s) y arrastra la bolsa con el instrumental por los rodillos hasta el final, donde llegará perfectamente sellada. La eficiencia del sistema de accionamiento de cierre y sellado permite cerrar muchas bolsas en una rápida frecuencia.



MillSeal Rolling puede regular la temperatura de sellado (140°C - 200°C), con visualizador de pantalla. Para mayor precisión de la temperatura que va utilizar, referirse a las recomendaciones del fabricante del material a sellar.

Una escala simple en pantalla permite al usuario controlar el progreso de la temperatura hasta que alcance el valor deseado.



Gracias al sistema de monitorización de la temperatura se obtiene un eficaz control del calentamiento de la zona a sellar, asegurando un rendimiento elevado y constante.

Millseal Rolling es una selladora de control electrónico que produce un sellado multibanda de 15 mm. diseñado para soportar los procesos de esterilización de los modernos autoclaves dotados de pre-vacío fraccionando y garantizando en el tiempo la esterilización del material tratado.

La selladora Millseal Rolling está diseñada para ser utilizada con bolsas preparadas, selladas en tres lados pero también puede ser utilizado en forma segura con rollos de papel (en este caso los precintos deben ser de dos).

El material idoneo para la confección y sellado de los instrumentos son bolsas o rollos de papel laminado de polipropileno para la esterilización.



No son idoneos los materiales tales como polietileno, PVC, poliamida



Millseal Rolling puede ser equipada con una impresora integrada, para crear una impresion resistente al tratamiento en el autoclave. durante el ciclo del sellado la impresora imprime automáticamente en la bolsa la fecha de confección y la fecha de caducidad además de los simbolos de la normativa. A través del teclado integrado, usted puede fijar el intervalo entre la fecha de sellado y la fecha de caducidad que será impresa en la bolsa.


También puede activar o desactivar la impresora, con su pantalla de visualización



Simbolo	Significado
	fecha de
	fabricación

OPCIONAL:


Recortadora

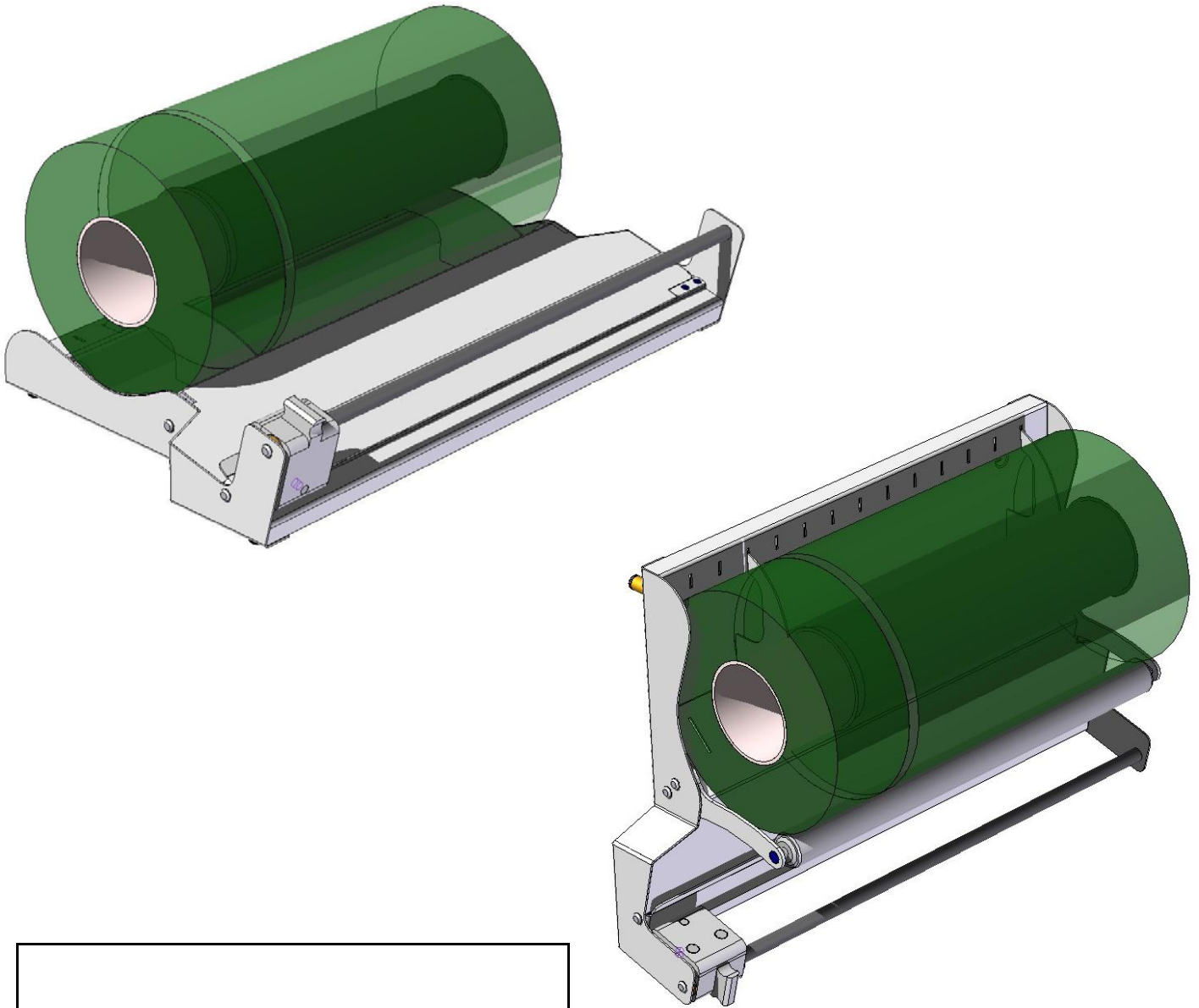

Taglierina

Lunghezza [mm]	520
Profondità [mm]	155
Altezza [mm]	330
Orientamento	Possibilità di installazione Orizzontale o Verticale
Larghezza massima rullo [mm]	380
Diametro massimo rullo [mm]	200

Rulliera

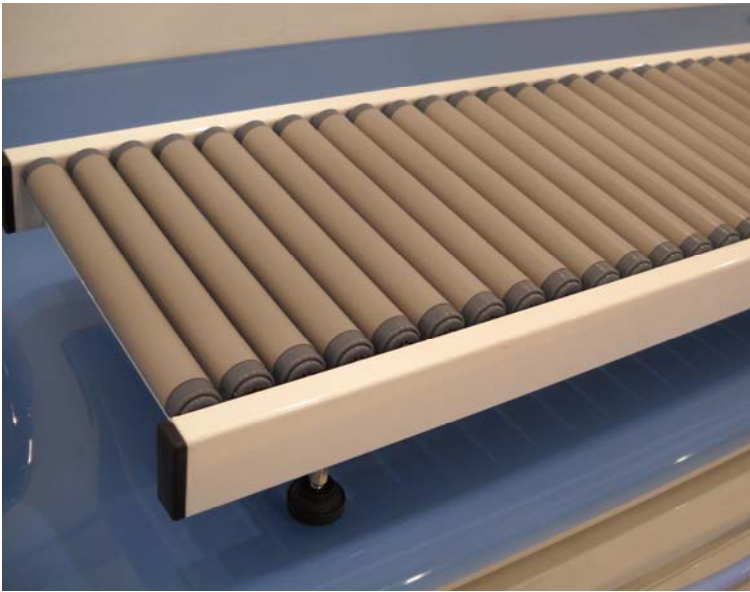

Rulliera	
Lunghezza [mm]	720
Profondità [mm]	220
Altezza [mm]	80
Numero di rulli	31
Diametro rulli [mm]	20

Pianetto



Pianetto	
Lunghezza [mm]	715
Profondità [mm]	225
Altezza [mm]	80