




1

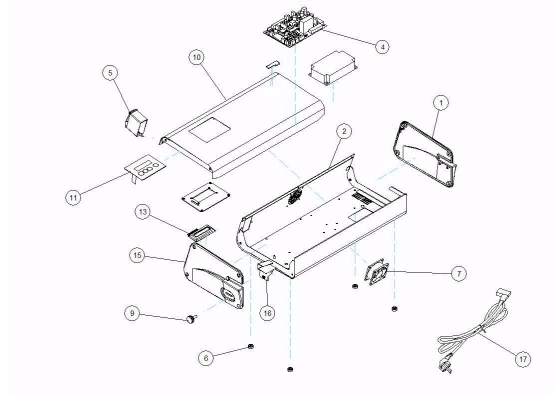


2

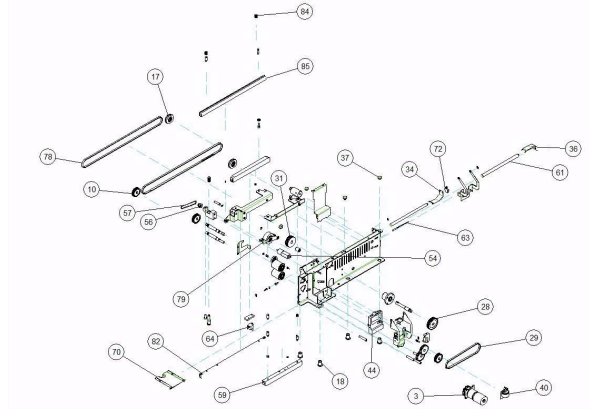


n.	Code	Descrizione / Description	Description / Beschreibung	Descripción
1		External External	External External	External
2		Internal Internal	Internal Internal	Internal

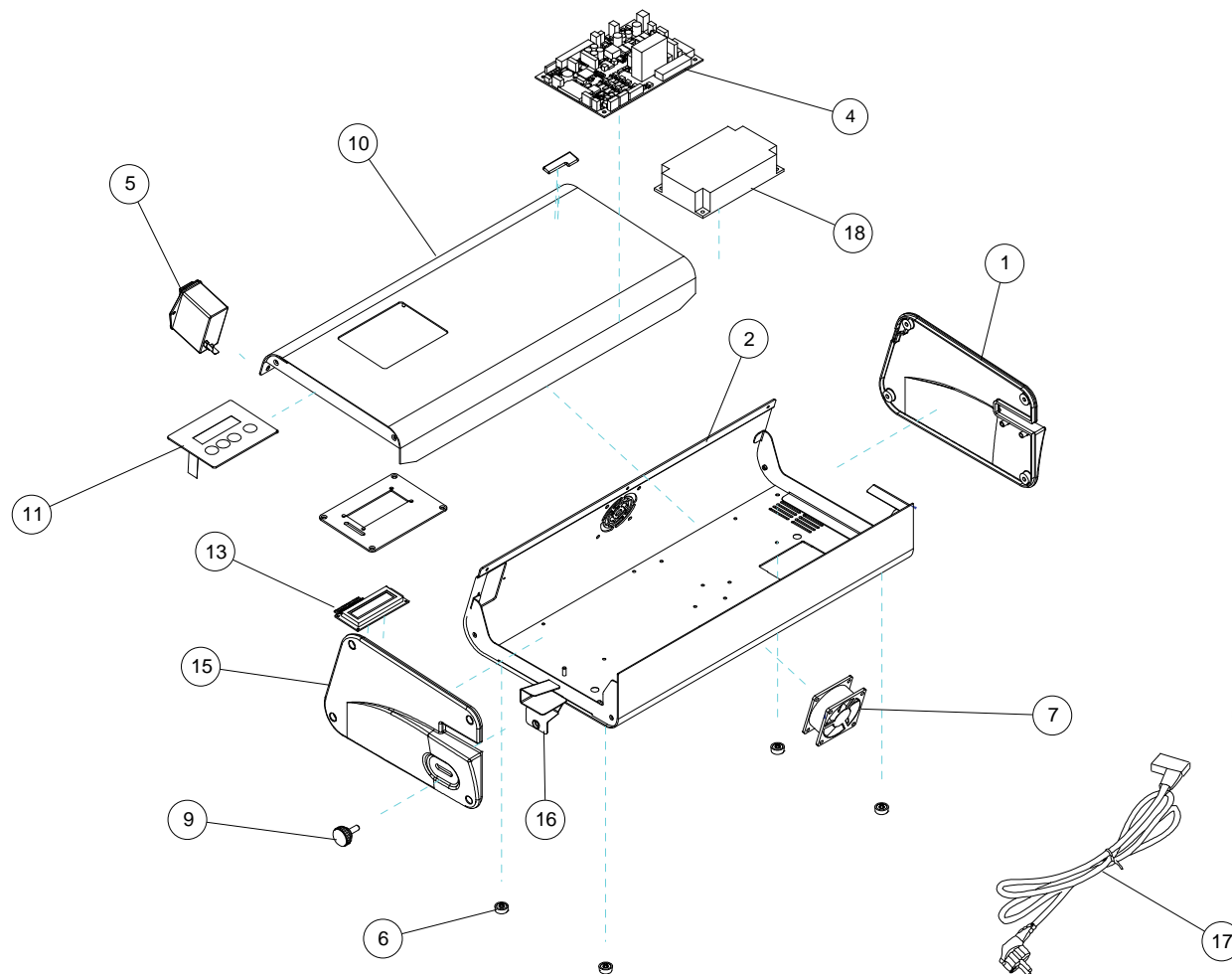

n.	Code	Descrizione / Description	Description / Beschreibung	Descripción
1	97467107	COPERCHIO LATO DX COPERCHIO LATO DX	COPERCHIO LATO DX COPERCHIO LATO DX	COPERCHIO LATO DX
2	99950787	GUSCIO INFERIORE VERNICIATO GUSCIO INFERIORE VERNICIATO	GUSCIO INFERIORE VERNICIATO GUSCIO INFERIORE VERNICIATO	GUSCIO INFERIORE VERNICIATO
4	97661055	SCHEDA CONTROLLO MILLSEAL COMMAND CARD MILLSEAL	PLATINE CONTROL MILLSEAL MILLSEAL KONTROLLE PLATINE	TARJETA CONTROL MILLSEAL
5	97560044	INTERRUTTORE CON FILTRO RET Mains filter with black switch	Mains filter with black switch Mains filter with black switch	Mains filter with black switch
6	97420126	PIEDINO PIEDINO	PIEDINO PIEDINO	PIEDINO
7	97740181	VENTOLA 60X60X25 24V 1.7W VENTOLA 60X60X25 24V 1.7W	VENTOLA 60X60X25 24V 1.7W VENTOLA 60X60X25 24V 1.7W	VENTOLA 60X60X25 24V 1.7W
9	97188800	VOLANTINO B.193/20 P-M6X16 VOLANTINO B.193/20 P-M6X16	VOLANTINO B.193/20 P-M6X16 VOLANTINO B.193/20 P-M6X16	VOLANTINO B.193/20 P-M6X16
10	99950786	GUSCIO SUPERIORE VERNICIATO GUSCIO SUPERIORE VERNICIATO	GUSCIO SUPERIORE VERNICIATO GUSCIO SUPERIORE VERNICIATO	GUSCIO SUPERIORE VERNICIATO
11	97620224	PULSANTIERA A MEMBRANA PULSANTIERA A MEMBRANA	PULSANTIERA A MEMBRANA PULSANTIERA A MEMBRANA	PULSANTIERA A MEMBRANA
13	97661119	DISPLAY CABLATO DISPLAY CABLATO	DISPLAY CABLATO DISPLAY CABLATO	DISPLAY CABLATO
15	97467106	COPERCHIO LATO SX COPERCHIO LATO SX	COPERCHIO LATO SX COPERCHIO LATO SX	COPERCHIO LATO SX
16	99950921	REGOLA BORDO INOX REGOLA BORDO INOX	REGOLA BORDO INOX REGOLA BORDO INOX	REGOLA BORDO INOX
17	97526018	CAVO ALIMENTAZIONE NERO 2MT Main cable (2 metres)	Main cable (2 metres) Main cable (2 metres)	Main cable (2 metres)
18	97661120	ALIMENTATORE 24V 65W ALIMENTATORE 24V 65W	ALIMENTATORE 24V 65W ALIMENTATORE 24V 65W	ALIMENTATORE 24V 65W

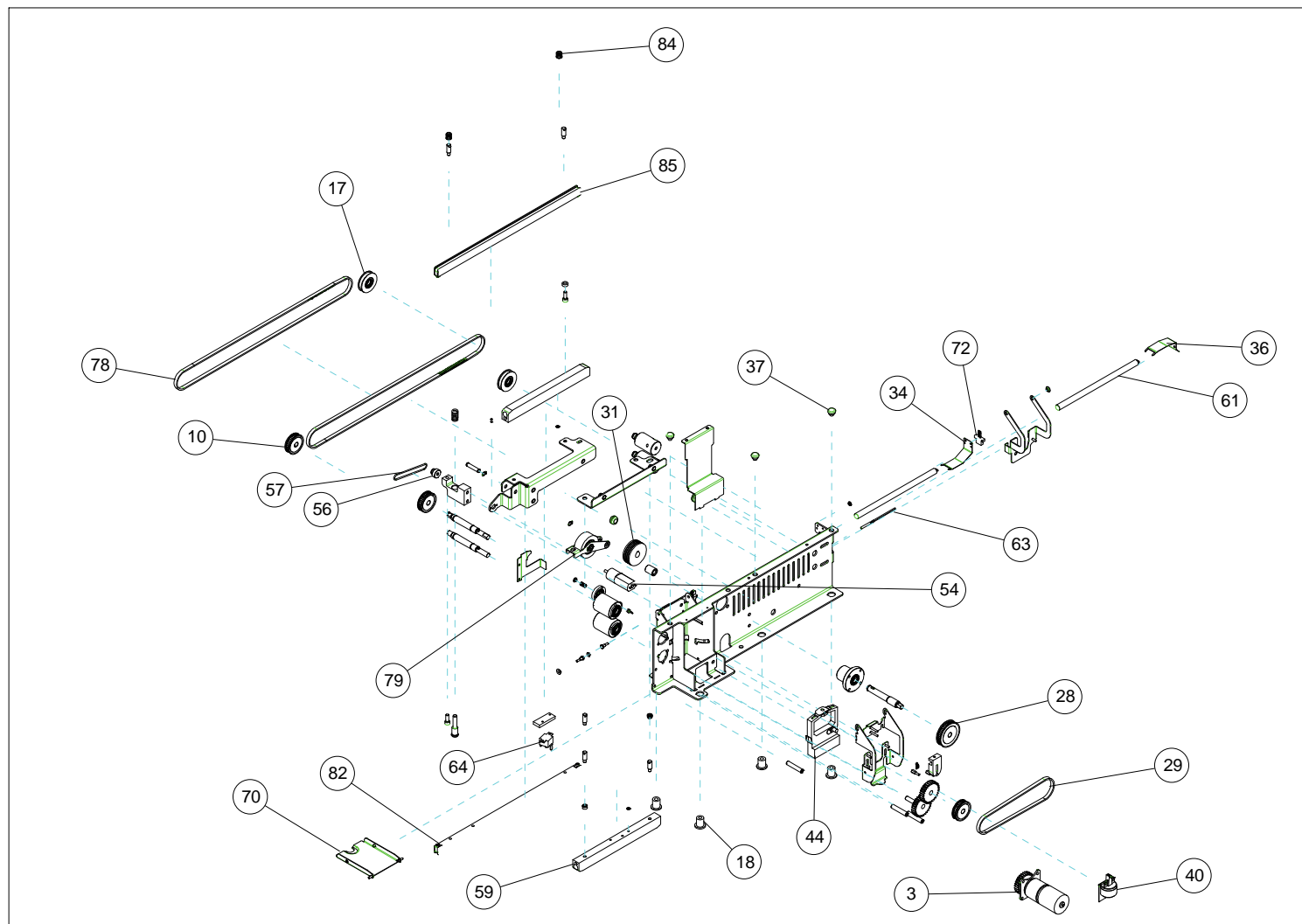

n.	Code	Descrizione / Description	Description / Beschreibung	Descripción
3	95530340	ASSIEME MOTORIDUTTORE GEAR ASSEMBLY	ASS DE PORTE MOTO-RÉDUCTEUR ASS TÜR-GEAR	ASS DE LA PUERTA DE MOTO-REDUC
10	97225700	PULEGGIA HTD 3M Z36 PULEGGIA HTD 3M Z36	PULEGGIA HTD 3M Z36 PULEGGIA HTD 3M Z36	PULEGGIA HTD 3M Z36
17	99950796	PULEGGIA LISCIA CINGHIA PULEGGIA LISCIA CINGHIA	PULEGGIA LISCIA CINGHIA PULEGGIA LISCIA CINGHIA	PULEGGIA LISCIA CINGHIA
18	97188600	RIVETTO ELASTICO M6 RIVETTO ELASTICO M6	RIVETTO ELASTICO M6 RIVETTO ELASTICO M6	RIVETTO ELASTICO M6
28	97226200	PULEGGIA HTD 3M Z44 PULEGGIA HTD 3M Z44	PULEGGIA HTD 3M Z44 PULEGGIA HTD 3M Z44	PULEGGIA HTD 3M Z44
29	97226000	CINGHIA 405 RPP3-6 CINGHIA 405 RPP3-6	CINGHIA 405 RPP3-6 CINGHIA 405 RPP3-6	CINGHIA 405 RPP3-6
31	99950799	RULLO NYLON RULLO NYLON	RULLO NYLON RULLO NYLON	RULLO NYLON
34	99950806	PIASTRINA INGRESSO INF PIASTRINA INGRESSO INF	PIASTRINA INGRESSO INF PIASTRINA INGRESSO INF	PIASTRINA INGRESSO INF
36	99950805	PIASTRINA INGRESSO SUP PIASTRINA INGRESSO SUP	PIASTRINA INGRESSO SUP PIASTRINA INGRESSO SUP	PIASTRINA INGRESSO SUP
37	97425500	PIEDINO GOMMA NERA BLACK RUBBER FOOT ART. 15.149	PIED CAOUTCH. NOIR ART. 15.149 GUMMIFUSS SCHWARZ ART. 15.149	PIE GOMA NEGRA
40	97521654	TESTINA STAMPA K 1200/81 TESTINA STAMPA K 1200/81	TESTINA STAMPA K 1200/81 TESTINA STAMPA K 1200/81	TESTINA STAMPA K 1200/81
44	97860028	CARTUCCIA STAMPANTE ROLLING ROLLING PRINTER CARTRIDGE	CARTOUCHE IMPRIMANTE ROLLING PATRONE FÜR DRUCKER ROLLING	CARTUCHO IMPRESORA ROLLING
54	95530775	GRUPPO MOTORIDUTTORE CBF MOTOR GRUPPO MOTORIDUTTORE CBF MOTOR	GRUPPO MOTORIDUTTORE CBF MOTOR GRUPPO MOTORIDUTTORE CBF MOTOR	GRUPPO MOTORIDUTTORE CBF MOTOR
56	99950826	PULEGGIA TRAZIONE PULEGGIA TRAZIONE	PULEGGIA TRAZIONE PULEGGIA TRAZIONE	PULEGGIA TRAZIONE
57	97371900	OR 2,62X39,34 NBR 70 OR 3156	JOINT OR 2,62X39,34 NBR 70 \$)_OR 2,62X39,34 NBR 70	OR 2,6 X 39,34 NBR 70

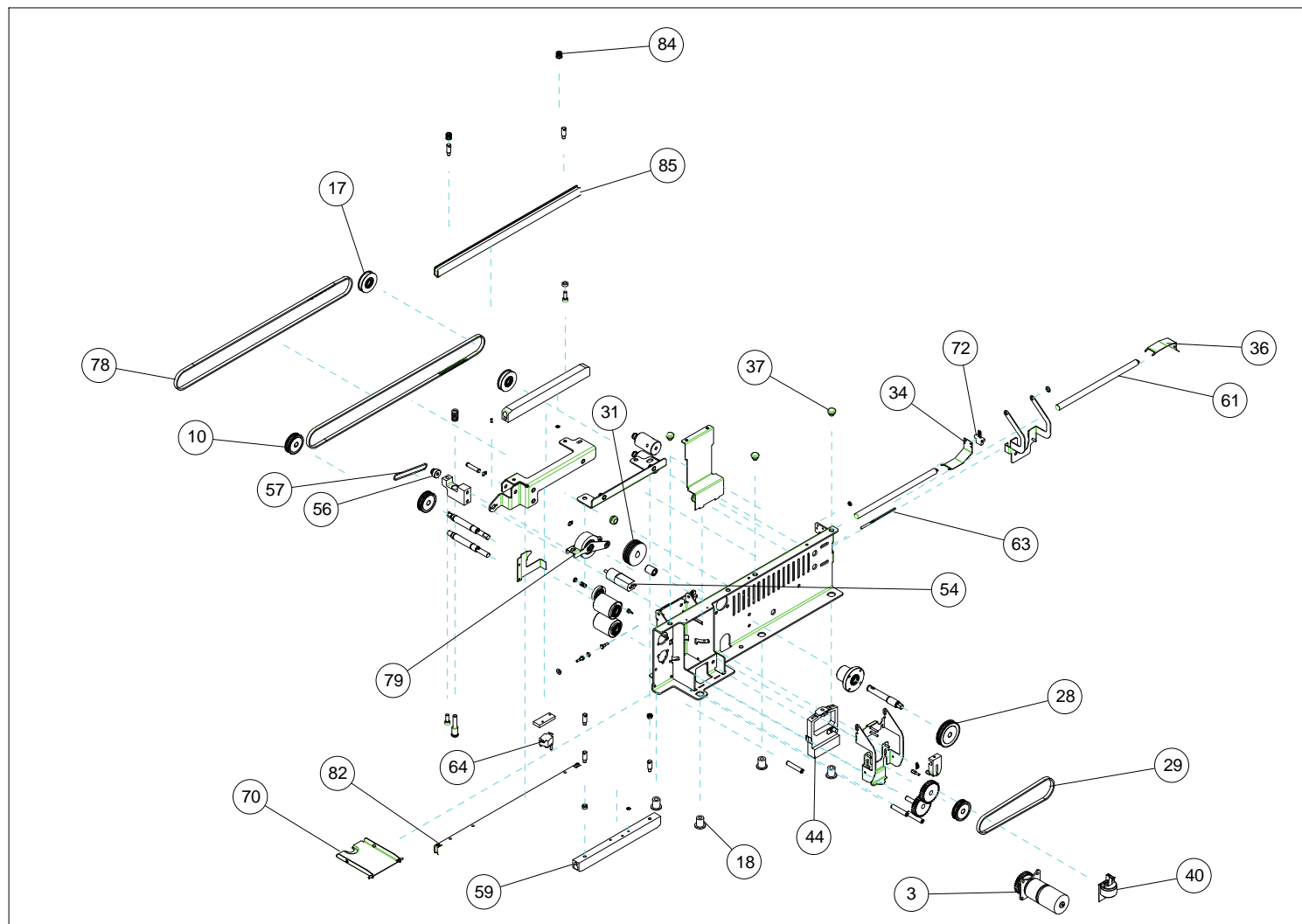

n.	Code	Descrizione / Description	Description / Beschreibung	Descripción
59	99950802	PORTARESISTENZA PORTARESISTENZA	PORTARESISTENZA PORTARESISTENZA	PORTARESISTENZA
61	97659800	RESISTENZA A CARTUCCIA RESISTENZA A CARTUCCIA	RESISTENZA A CARTUCCIA RESISTENZA A CARTUCCIA	RESISTENZA A CARTUCCIA
63	97661121	SENSORE TEMPERATURA CABLATO SENSORE TEMPERATURA CABLATO	SENSORE TEMPERATURA CABLATO SENSORE TEMPERATURA CABLATO	SENSORE TEMPERATURA CABLATO
64	97730021	TERMOSTATO SICUREZZ 220°C NERO 220 DEGREES C SAFETY THERMO-SW	THERMOSTAT DE SÉCURITÉ 220°C SICHERHEITSTHERMOSTAT 220°C	TERMOSTATO SEGURIDAD 220°C
70	99950808	SPORTELLINO STAMPANTE VERNI SPORTELLINO STAMPANTE VERNI	SPORTELLINO STAMPANTE VERNI SPORTELLINO STAMPANTE VERNI	SPORTELLINO STAMPANTE VERNI
72	97700391	FOTOCPELLULA A RIFRAZIONE FOTOCPELLULA A RIFRAZIONE	FOTOCPELLULA A RIFRAZIONE FOTOCPELLULA A RIFRAZIONE	FOTOCPELLULA A RIFRAZIONE
78	97225900	CINGHIA HTD 882 6MM 3M CINGHIA HTD 882 6MM 3M	CINGHIA HTD 882 6MM 3M CINGHIA HTD 882 6MM 3M	CINGHIA HTD 882 6MM 3M
79	95530338	ASS. RULLO DI SCHIACCIAMENTO ASS CRUSH ROLLER	ASS DE BROYAGE ROULEAU ASS CRUSH-ROLLER	ASS APLASTAR A RODILLO
82	97901492	GUIDA CINGHIA POLIZENE 6 MM GUIDA CINGHIA POLIZENE 6 MM	GUIDA CINGHIA POLIZENE 6 MM GUIDA CINGHIA POLIZENE 6 MM	GUIDA CINGHIA POLIZENE 6 MM
84	97815199	MOLLA GUIDA CINGHIA BELT GUIDE SPRING	CEINTURE GUIDE RESSORT GÜRTEL-GUIDE-FRÜHLING	CORREA GUÍA DE PRIMAVERA
85	99950801	SEDE CINGHIA SEDE CINGHIA	SEDE CINGHIA SEDE CINGHIA	SEDE CINGHIA